





ONCO-GRIP® Aiguille de Huber sécurisée mono manuelle à dispositif de préhension
SAFE* amovible avec ou sans site d'injection (avec ou sans needle free)

CE
0120

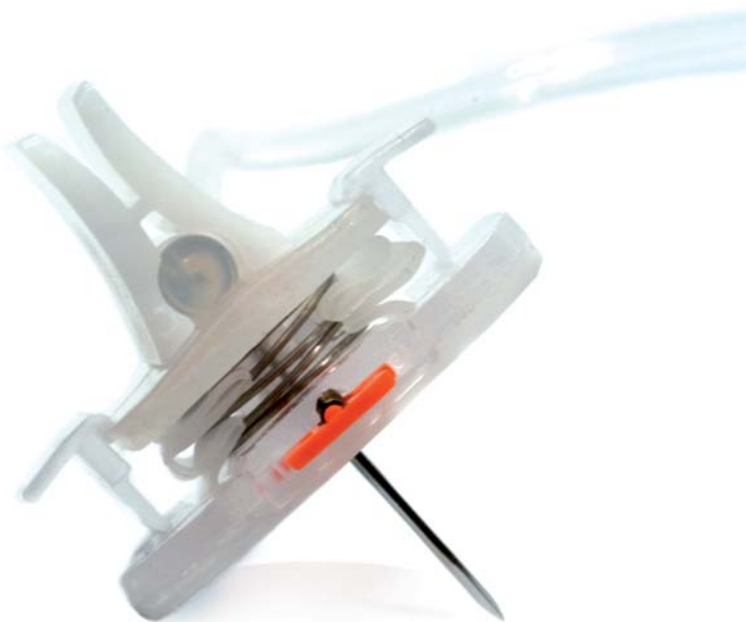

REF.	CANULE		PROLONGATEUR	
	LONGUEUR (MM)	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAMETRE (MM)
GNS 1915	15	1,1	18	2,5
GNS 1920	20	1,1	18	2,5
GNS 1925	25	1,1	18	2,5
GNS 1932	32	1,1	18	2,5
GNS 1938	38	1,1	18	2,5
GNS 2015	15	0,9	18	2,5
GNS 2020	20	0,9	18	2,5
GNS 2025	25	0,9	18	2,5
GNS 2032	32	0,9	18	2,5
GNS 2038	38	0,9	18	2,5
GNS 2215	15	0,7	18	2,5
GNS 2220	20	0,7	18	2,5
GNS 2225	25	0,7	18	2,5
GNS 2232	32	0,7	18	2,5
GNS 2238	38	0,7	18	2,5

Option needle free : ajouter YS à la référence

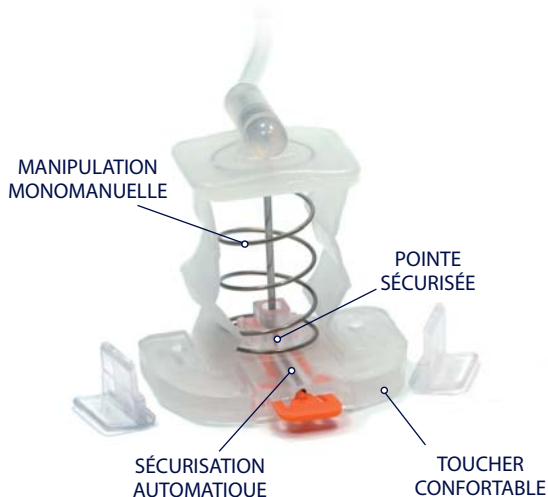

NEEDLE FREE

*Brevet FB Medical - Agrément GERES

L'Onco-Grip Safe peut être retirée d'une seule main ce qui permet à l'utilisateur d'effectuer la pression positive en même temps. Une fois déclenchée, elle n'est pas réutilisable.

Après avoir cassé les petites pattes, l'utilisateur enlève facilement l'aiguille du site d'injection sans risque de piqûre. La mise en sécurité est automatique, la pointe se retrouve confinée, éliminant ainsi l'effet rebond. L'aiguille présente un faible encombrement général comparé aux aiguilles de même type. Son design assure une bonne stabilité et évite tout risque de basculement douloureux.

Le confort du patient est complété par le revêtement élastomérique en contact avec la peau. L'aiguille comporte un prolongateur exempt de phtalates, portant un clamp de fermeture et terminé par une embase Luer Lock. Il peut être fourni en option avec site d'injection ne nécessitant pas d'aiguille (needle free). Le grip amovible en POM (poly-oxy-méthylène) permet une préhension facile et sûre et facilite la ponction. L'aiguille est fournie stérile (oxyde d'éthylène) sous blister souple transparent.

Boîte de 40 unités
Fabrication française